

**Inhaltsstoffe:** Milchsäure und Hilfsstoffe bestehend aus Aqua, Propylenglykol, Xanthangummi, Glycerin, Natriumlevulinat, Hydroxypropylmethylcellulose, Natriumlactat, Galactoarabinan, Natriumanisat.


- Lindert unangenehmen Geruch und anormalen Ausfluss
- Schnelle Linderung von Juckreiz, Brennen, vaginaler Reizung und anormalem Ausfluss
- Behandlung bakterieller Vaginose
- Optimiert das Gleichgewicht der Vaginal Flora und hemmt das Wachstum pathogener Mikroorganismen

**Empfehlungen:** Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung von BACTEVAG Gel sorgfältig durch, auch wenn Sie dieses Gel bereits zuvor verwendet haben. Die Informationen können seit dem Öffnen der letzten Packung aufgrund neuer Forschungsergebnisse und Erkenntnisse geändert worden sein. Das BACTEVAG Gel ist rezeptfrei erhältlich. Gehen Sie bei der Anwendung von BACTEVAG Gel dennoch vorsichtig vor, um gute Ergebnisse zu erzielen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf, falls Sie sie erneut konsultieren müssen.

**Verwendungszweck:** BACTEVAG Gel ist ein Hilfsmittel zur Behandlung bakterieller Vaginose und zur Wiederherstellung des Säuregehalts und des Gleichgewichts der Vaginal Flora. Es ist ein säuerndes Gel aus Milchsäure, das durch Senkung des vaginalen pH-Werts zur Wiederherstellung des vaginalen mikrobiellen Milieus beiträgt.

Gebrauchsanweisung (nur für Erwachsene): BACTEVAG Gel wird in hygienischen Einmal-Applikatoren geliefert, um das Einführen in die Vagina zu erleichtern. Am besten verwenden Sie BACTEVAG Gel vor dem Schlafengehen im Liegen. Dies reduziert das potenzielle Auslaufen. Es kann hilfreich sein, eine Slipeinlage zu tragen, da es häufig zu leichtem Auslaufen kommt. Nach dem Öffnen sofort verwenden.

1. Die Lasche am Ende abbrechen und entfernen.
2. Setzen oder legen Sie sich in eine bequeme Position und führen Sie den Hals des Applikators vorsichtig so weit wie möglich in die Vagina ein.
3. Drücken Sie den Applikator leicht zusammen, um den Inhalt freizugeben.
4. Entfernen Sie die Tube, während Sie sie noch zusammendrücken, und entsorgen Sie sie.

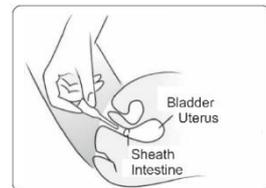

**Wirkungsweise:** BACTEVAG Gel wird mit einem Einmal Applikator in die Vagina eingeführt, wo es sich auflöst und die Wiederherstellung der natürlichen physiologischen Bedingungen in der Vagina sowie das gesunde Wachstum der normalen Bakterien fördert. Der Wirkstoff ist Milchsäure, die eine Umgebung schafft, die für das übermäßige Wachstum potenziell pathogener Bakterien und Pilze ungünstig ist, die Entstehung einer säurehaltigen und säurebildenden Flora begünstigt und das Wachstum erwünschter Bakterien durch die Bildung von Milchsäure bei der Fermentation von Kohlenhydraten fördert. Milchsäure ermöglicht die pH-Kontrolle im optimalen Bereich (normalerweise pH 4,0 – 4,5). Milchsäure trägt zur vaginalen Säure bei.

**Inhalt:** 7 Vaginaltuben à 5 ml.

**Mögliche Nebenwirkungen:** Milchsäure ist sicher und verträglich. Häufige Nebenwirkungen sind vaginale Symptome wie Juckreiz und/oder ein brennendes Gefühl.

#### Warnhinweise:

- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Verwenden Sie BACTEVAG Gel nicht, wenn Sie gegen einen oder mehrere der Inhaltsstoffe überempfindlich sind.
- Anwendung während der Schwangerschaft und/oder Stillzeit: Wie bei jedem Arzneimittel sollten Sie, wenn Sie schwanger sind oder stillen, vor der Anwendung dieses Produkts den Rat eines Arztes einholen.
- Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Produkt anwenden, wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- Wenn bei Ihnen allergische Reaktionen auftreten, beenden Sie die Anwendung des Produkts.
- Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.



**Lagerungshinweise:** Bei Raumtemperatur (5-25°C) an einem trockenen und dunklen Ort im Originalbehälter und außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.



**Haltbarkeit:** 36 Monate ab Herstellungsdatum. Das Herstellungsdatum ist in der Seriennummer enthalten, die auf der Schweißnaht der Tube aufgedruckt ist und auf der Verpackung aufgedruckt ist.

